



1. Achten Sie darauf, Ihre Brille in einem festen Etui aufzubewahren, wenn Sie sie nicht tragen, um sicherzustellen, dass diese beim Transport etc. nicht beschädigt wird. Setzen Sie die Brille stets mit beiden Händen auf und ab.

2. Spülen Sie Ihre Brille häufig mit warmem Wasser ab. Benutzen Sie zum Reinigen ein mildes Geschirrspülmittel, spülen Sie die Brillenfassung hinterher mit klarem Wasser und trocknen Sie die Brille danach mit einem sauberen Reinigungstuch ab. Nutzen Sie auch mindestens alle 4-6 Monate eine Ultraschallreinigung (max. 4min pro Vorgang), um z.B. Scharniere und Nasenauflagen besser zu reinigen. Berücksichtigen Sie dabei auch die beim Ultraschallgerät beiliegenden Hinweise zum Gebrauch.

3. Überprüfen Sie Ihre Brille regelmäßig, um sicherzustellen, dass die Schrauben nicht locker sind – wenn Sie eine finden, ziehen Sie sie vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher fest oder schauen Sie bei Ihrem Optiker vorbei. Lassen Sie auch sonst Ihre Brillenfassung mindestens einmal im Jahr beim Optiker auf den richtigen Sitz kontrollieren.



1. Tragen Sie Ihre Fassung nicht auf dem Kopf. Dies überdehnt schließlich die Bügel und den Mittelteil der Brillenfassung mit der Zeit und wird die Passform der Fassung verändern. Versuchen Sie generell nicht, Ihre Brillenfassung selbst anzupassen, wieder in Form zu bringen. Gehen Sie dazu zu einem Optiker.

2. Vermeiden Sie es, Ihre Fassung zu tragen, während Sie Haarspray oder Sonnenschutz auf Ihr Gesicht sprühen. Entfernen Sie Schweiß und Fettrückstände, um einer chemischen und biologischen Belastung vorzubeugen. Verwenden Sie dazu keine aggressiven Reinigungsmittel, wie z.B. Fensterreiniger oder alkoholhaltige Putztücher. Tragen Sie die Brille nicht bei/ direkt nach dem Haare färben, da es zu Farbrückständen kommen kann.

3. Setzen Sie Ihre Brillenfassung nicht zu lange intensiver Sonneneinstrahlung und sehr hohen Temperaturen aus. Lassen Sie Ihre Brillenfassung nicht hinter der Windschutzscheibe Ihres Autos liegen. Acetat reagiert sehr hitzeempfindlich und verformt sich möglicherweise. Direkte Sonneneinstrahlung lässt die Fassung schneller altern.